

Instruction „touche Jour“ Genius

Où trouver la touche Jour?



Lorsque la touche Jour est activée, le cercle jaune s'allume.

Appuyez sur la touche verte pour confirmer la touche Jour.


Que fait la touche Jour?

La touche Jour surveille l'activité des utilisateurs. Si la touche Jour est activée il faut appuyer 1 fois par jour (dans 24 heures) sur la touche verte du Genius. Si l'utilisateur n'appuie pas sur la touche verte dans 24 heures, le Genius émet des bips chaque 10 minutes pendant une heure. Après cette heure, un proche va être contacté par E-Mail.

Comment puis-je activer ou désactiver la touche Jour?

Activez la touche Jour dans notre espace clients en ligne ou par notre hotline. Pour l'activation dans notre espace clients, connectez-vous et choisissez „modifier des appareils d'appel d'urgence“. Dans l'écran suivant, choisissez „Options“ et activez la touche Jour.


La fonction peut être désactivée et réactivée manuellement. Appuyez sur le bouton avec le cercle jaune. Veuillez noter que le cercle jaune s'allume lorsque la fonction de la touche jour est activée.

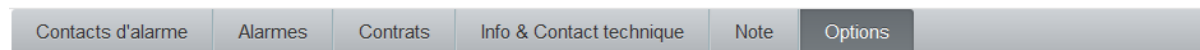

La touche Jour de l'appareil d'appel d'urgence est: Désactivée



Autoriser les appels sur l'appareil d'appel d'urgence : la première fois, veuillez sélectionner la valeur

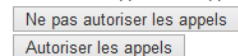

Les appels vers l'appareil d'appel d'urgence peuvent être réceptionnés en appuyant sur le bouton d'alarme du dispositif d'appel d'urgence ou de la télécommande.

Où voir si la touche Jour est activée?

Si la touche Jour est activée, la touche jaune du Genius est illuminée.

Avez-vous encore des questions?

Nous vous conseillons volontiers tous les jours de 06h30 à 20h00 : Hotline 0848 65 65 65.

SmartLife Care SA

Zürichstrasse 38
8306 Brüttsellen

Support 0848 65 65 65
support@smartlifecare.ch